

画像の静止/保存の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000

画像の静止/保存の手順



画面の静止

【Freeze】 ボタンを押すと画面が静止します。

静止画保存

【P1】 【P2/3/4】 で保存/プリントが可能です。

*設定により異なります。

1. 本体ハードディスクに画像保存
2. 白黒プリンタ
3. カラープリンタ
4. ネットワーク 画像転送

動画画保存

【Freeze】 ボタンを押さずに保存ボタンを押すと動画が保存されます。

*設定で保存の秒数を変更できます。