


検査終了の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000


検査終了の手順

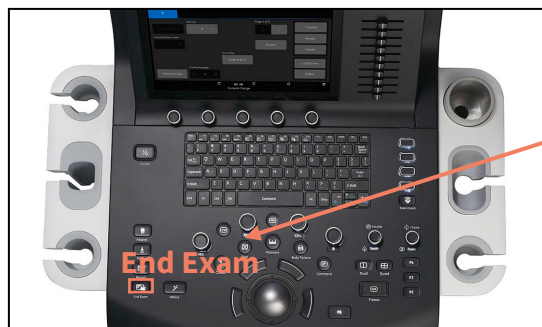

1. 【End Exam】 ボタンを押してください。
Active Image(画像一覧)が表示されます。



2.画像一覧から消去したい画像は選択して
【Delete】、転送したい画像は【Send to】
を選択してください。

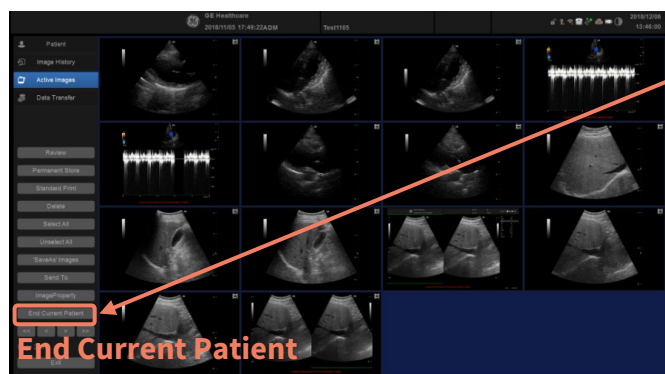

3.モニター上の【End Current Patient】を
選択してください。検査が終了します。

*設定により、【Patient】 ボタンのみで検査終了
を行うことも可能です。