

プローブ/プリセット選択の手順




このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000

プローブ/プリセット選択の手順

1. 操作パネル上の【Probe】キーを押してください。

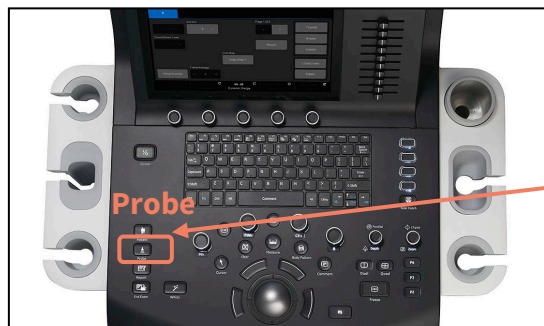

2. タッチパネルの上段に接続されているプローブが表示されます。
使用するプローブをタッチしてください。

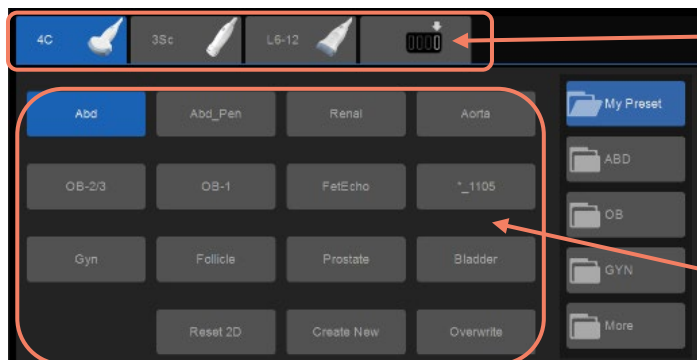

3. 使用するプリセットをタッチしてください。

Abdomen：腹部向け
Renal：腎臓向け
Bladder：膀胱向け
Adult：成人循環器向け
Thyroid：甲状腺向け
Breast：乳腺向け

MscSkel：整形外科向け
Carotid：頸動脈向け
LEV：下肢静脈向け
LEA：下肢動脈向け
UEA：上肢動脈向け