

画像調整等の基本操作の手順




このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000

画像調整等の基本操作の手順



フォーカス位置

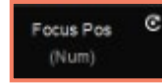


ボタンを回転して、フォーカスの位置を変更します。

深度(depth)

ボタンを回転して、表示深度を調整します。

2画面表示

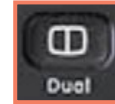

ボタンを押すと2画面表示になります。もう一度ボタンを押すと、反対側の画面でスキャンが可能です。
*画面下に緑色のバーがある方が、アクティブ画面です。

Whizz(画像最適化)

ボタンを1度押すと、画像の最適化をサポートする機能です。

Whizzは明るさ、コントラスト、音線密度、周波数を最適化し、Bモードの均一性を向上させる機能です。

*パルスモードで使用すると、スケールとベースラインを最適化し、最適な波形にします。

ゲイン(輝度)

ボタンを回転して、画面の輝度を調整します。