

コメント選択の手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000

コメント選択の手順



1. コメント入力には2種類の方法があります。

- ① 操作パネルの【Comment】ボタンを押します。
タッチパネル上のコメントをタッチします。

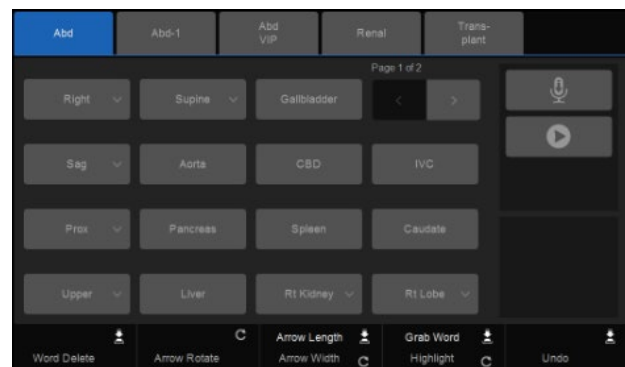

- ② もしくは、キーボードで、任意のコメントを入力します。

2. トラックボールで任意の場所に移動し、
Setキーで確定します。

3. コメントの編集、場所を変更したい際は、
カーソルをコメントに合わせてSetを押します。