

パルスドプラ(PW)/連続波ドプラ (CW)モードへの切り替え手順



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・注意事項等情報も併せてご確認ください


製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000

記載内容は、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。
2026.4 GE HealthCare 超音波本部 Primary Care部

パルスドプラ(PW)/連続波ドプラ(CW)モードへの切り替え手順



1. 【Set(Mode Cursor)】キーを押すと、ドプラカーソルが表示されます。

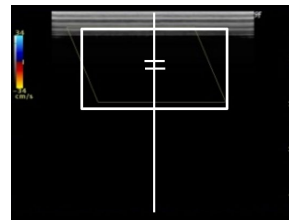

2. トラックボールで、サンプルポイントに位置を合わせます。



3. タッチパネルの上で、サンプルボリューム【SV Length】や角度補正ができます。



4. 【Set(PW)】キーを押すとパルスドプラ波形が表示されます。

*CWはアプリケーションで【CARD】を選択すると、表示されます。